

ref. **53907****MASQUE
CHIRUGICAL IIR****Description**

Masque jetable pour la protection respiratoire, il filtre plus de 98% des particules permettant une respiration confortable pendant le quart de travail. Non stérile.

Fabriqué avec du polypropylène, non tissé, avec du matériel filtrant de 3 couches et bande métallique.

Especificaciones técnicas

Matériel	100% fibre de polypropylène
Mesures	17,5x9,5cm
Type	IIR
Classification	Clase I
Efficacité de filtration bactérienne (BFE)	≥ 98%
Nettoyage microbien	≤ 30 CFU/g
Pression différentielle	< 60 Pa/cm2
Pression de résistance aux éclaboussures : ≥ 16 kPa	≥ 16 kPa
Durée de vie	3 ans

Exigences

Spécifications EN 14683: 2019 + AC: 2019. Masques chirurgicaux. Exigences et méthodes d'essai.

Cet appareil est un appareil médical au sens de la directive 93/42 / CEE.

POUR UN USAGE PERSONNEL, NON RÉUTILISABLE.

**Mode d'emploi**

1. Se laver les mains au préalable avec de l'eau et du savon ou avec de la lotion hydroalcoolique.
2. Mettre le masque et ajuster la pince sur le nez en couvrant le menton.
3. Ne pas utiliser le masque pendant plus de 4 heures et ne pas toucher avec les mains pendant l'utilisation.
4. Le remplacer pas un autre dans le cas où il deviendrait humide ou endommagé.
5. Enlever le masque sans toucher la partie frontale et le jeter dans un conteneur approprié de sac en plastique.
6. Ne doit pas être mis sur le front ou menton pendant ou après l'utilisation.



Presentation: Sachet de 50 unités par boîte. 2000 unités/carton.

**Normes de qualité**

EN 14683: 2019+AC:2019

EN ISO 13485:2016

EN ISO 11737-1:2018

ISO 22609:2004